



CE

Kiilto Pro Erinox Termo

Erikoispesuaine



Erikoispesuaine endoskooppien pesu-desinfektiolaitteisiin. Soveltuu käytettäväksi useimmissa endoskooppien pesu-desinfektiolaitteissa. Lääkinnällinen laite. Ammattikäyttöön.

Käyttökohteet

Erikoispesuaine endoskooppien pesu-desinfektiolaitteisiin. Soveltuu käytettäväksi useimmissa endoskooppien pesu-desinfektiolaitteissa. Lääkinnällinen laite. Ammattikäyttöön.

Tuoteominaisuudet

Tuotekehitetty erityisesti taipuisten tähyntinten koneelliseen pesuun. Tehokas orgaanisen lian irrottaja, silti materiaaleille hellävarainen. Vaahtoamaton ja helposti huuhtoutuva.

Käyttö- ja annostusohje

Liitä kanisteri koneen automaattiannostelijaan. Suositeltava annostus n. 0,5 % (0,3-0,7 %).

Huomioitavaa

Ennen käyttöönottoa on varmistettava, että valmiste soveltuu käytössä olevan endoskooppien pesu- ja desinfektio koneessa käytettäväksi. Laitteiden tekninen huolto suorittaa annostelun kalibroinnin.

Koostumus

Tehoaine		Vaikutus
Anionisia tensidejä	< 5 %	pesuteho
Ionittomia tensidejä	< 5 %	pesuteho
2-propanoli	< 5 %	isopropanoli, liuotin
Natriumsitraatti	< 5 %	dispergointiaine
Natriumpolyakrylaatti	< 5 %	dispergointiaine
Natriumglukonaattia	5 - 15 %	dispergointiaine
Monopropyleeniglykolia	5 - 15 %	liuotin

Tuotteen pH

10.0 heikosti emäksinen

Käyttöliuoksen pH

9.5 heikosti emäksinen

Varastointi

5 - 25°C, 3 v. valmistusajankohdasta

Ulkonäkö ja tuoksu

Kirkas, kellertävä neste

Valmistusmaa

SUOMI

**Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus**

Erinox Termo erikoispesuaineeseen liittyvistä mahdollisista vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle asiakaspalvelu@kiilto.com ja lääkinällisistä laitteista vastaavalle viranomaiselle (Suomessa Fimea).

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi**

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN	eurokanisteri
3 x 5 l	8141	6417964081411	6417964482508	

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.