



WipeClean Alco Free

Disinfection

Desinfektiopyyhe



Alkoholiton desinfektiopyyhe pintojen ja lääkinnällisten laitteiden desinfiointiin. Pakkauksessa 25 pyyhettä.

Lääkinnällinen laite. Ammattikäyttöön.

Käyttökohteet

Kosteapyyhintää sietävien pintojen ja ei-invasiivisten lääkinnällisten laitteiden desinfiointiin terveydenhuollossa, ammattikäyttöön.

Tuot ominaisuudet

Laajakirjoisesti tehokas desinfektioaineseos, tehoalueena bakteerit, fungit, virukset, itiöt, tuberkuloosi ja mykobakteerit. Tuotteen mikrobisidinen teho on tutkittu: Bakteerit: EN 13727 (1 min), EN 13697 (1 min), EN 16615 (1 min), fungit: EN 13624 (2min), EN 13697 (hiivat, 2 min), EN 16615 (hiivat, 1 min), virukset: EN 14476 (noro- ja adenovirus, 1 min), tuberkuloosi ja mykobakteerit EN 14348 (1 min).

Kuitukangaspyyhe, 50 gsm (1 m* 1m) 100% polyesteriä, vapauttaa desinfektioaineen tehokkaasti käyttöön. Pehmeä, sopivan paksuinen pyyhemateriaali puhdistaa ja kostuttaa desinfioitavat pinnat hyvin. Pyyhekoko 20 x 30 cm.

Pakkaus on helppo avata ja sulkea uudelleen. Kansiosassa on merkintäalue käyttöönottopäiväykselle. Avatun pakkauksen käyttöaika max. 2 kk.

CE-merkitty lääkinnällinen laite, luokka IIa, NB 2797.

Käyttö- ja annostusohje

Pyyhi desinfioitava laite/alue huolellisesti, desinfioitavan pinnan on oltava kauttaaltaan kosketuksissa desinfektioaineseen. Odota, että kosteus on haihtunut pinnalta ennen laitteen seuraavaa käyttöönottoa. Pintoja ei yleensä tarvitse esipestä eikä huuhdella. Mikäli desinfioitavan pinnan on oltava ehdottoman jäämävapaa, voidaan pinta huuhdella tai pyyhkiä veteen kostutetulla taitoksella desinfioinnin jälkeen. Sulje pakkaus aina käytön jälkeen.

Pyyhe riittää 1 m² alueen desinfiointiin.

Koostumus

Tehoaine		Vaikutus
DDAC	6,4 g/kg	desinfointiaine
Triamine	5,31 g/kg	desinfointiaine

Varastointi

Säilytä pakkaukset kuivassa, jäätymättömässä tilassa, suoralta auringonvalolta suojattuna. Huoneenlämmössä 3 v.

Ulkonäkö ja tuoksu

Valkoinen pyyhemateriaali, mieto tuoksu

Valmistusmaa

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

**Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus**

Ei suositella luonnonkumille ja pahvipinnoille. Tarkista laitevalmistajan ohjeistukset desinfiointiin ennen tuotteen käyttöä. Käytä suojakäsineitä.

Alco Free Wipes desinfektiopyyhkeisiin liittyvistä mahdollisista vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle asiakaspalvelu@kiilto.com ja lääkinnällisistä laitteista vastaavalle viranomaiselle (Suomessa Fimea).

Käytä biosidituotteita turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä. Tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Pyyhemateriaali on polyesteriä. Pyyhepakkaus on ulkokuoreltaan pet/pe muovia. Pyyhepakkaus ja pyyhkeet ovat energia- tai yhdyskuntajaetta.

**Pakkaukoko /
Tuotekoodi**

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN
20 x 25 kpl	5203	5701684520321	5701684520314
12 x 100 kpl	5205	5701684520529	

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.