



Kiilto Pro Easydes

Desinfektiopyyhe



Mikrobisidisesti tehokas, käyttövalmis ja nopeavaikutteinen desinfektiopyyhe alkoholeja sietäville ei-invasiivisille lääkinnällisille laitteille ja infektioiden torjunnan kannalta kriittisille pinnoille.

Käyttökohteet

Infektoriskitilanteissa, tartuntateiden katkaisussa kriittisten kosketuspintojen desinfiointiin. Soveltuu tavanomaisille materiaaleille, myös useimmat muovit.

Terveystieteiden tutkimusvälineille, -laitteille ja pintadesinfektioon. Esim. stetoskoopit, kaukosäätimet, vetimet, laitteiden näppäimistö, säätimet ja kosketuspinnat. Erinomainen myös kotisairaanhoidossa.

Lääkinnällinen laite. Ammattikäyttöön.

Tuot ominaisuudet

Pieni pakkaus sisältää 16 pyyhettä, isossa 30 pyyhettä. Mikrobisidisenä vaikuttajana pyyhkeissä on etanolipohjainen Easydes pesevä pintadesinfektioaine, joka on orgaanista rasiitusta kestävä, mikrobisidisesti laajatehoinen, ja nopeavaikutteinen desinfektioaineseos. Easydes tuhoaa tehokkaasti bakteerit, virukset ja fungit. Desinfektiovoima saavutetaan myös näkyvästi kontaminoituneilla pinnoilla. Pyyhemateriaali on nukkaamatonta. Uudestaan suljettava pakkaus on hygieeninen käytössä.

Tuotteen mikrobisidinen teho on tutkittu: EN16615 30 kpl desinfektiopyyhkeelle (16 kpl desinfektiopyyhkeelle EN16615 testin läpäisee *S. aureus*, *P. aeruginosa* ja *C.albicans*). Lisäksi Easydes Pesevän pintadesinfektioaineen tutkimustieto: EN 13727 (bakteerit), EN 13624 (hiivat), EN 14348 (tuberkuloosi ja mykobakteerit), EN 14476 (adeno- ja norovirus), EN 14561 (bakteerit), EN 14562 (hiivat, homeet), EN 14563 (mykobakteerit ja tuberkuloosi).

Käyttö- ja annostusohje

Pyyhi desinfioitava laite/alue huolellisesti. Huomioi, että desinfioitava pinta kostuu kauttaaltaan. Odota, että alkoholi on haihtunut pinnalta ennen laitteen seuraavaa käyttöönottoa.

Pintoja ei yleensä tarvitse esipestä eikä huuhdella. Mikäli desinfioitavan pinnan on oltava ehdottoman jäämätöntä, voidaan pinta huuhdella tai pyyhkiä veteen kostutetulla taitoksella desinfioinnin jälkeen. Desinfektio on tapahtunut, kun pyyhitty pinta on kuiva.

Huomioitavaa

Merkitse käyttöönottopäiväys pakkaukseen. Sulje pakkaus aina käytön jälkeen.

8285: Käytä avattu pakkaus 7 vrk kuluessa.

8286: Avattu pakkaus säilyy 3 kk.

Noudata laitevalmistajien puhdistus- ja desinfiointiohjeita.

Clostridium difficile epidemioissa suosittelemme käytettäväksi Klorilli tai Erisan Oxy+ desinfektioainetta, sillä alkoholipohjaiset tuotteet eivät tuhoa bakteeri-itiöitä.

Koostumus	Tehoaine	Vaikutus	
	Etanolia	60 p-%	biosidi
	Tertiäärinen butanoli	< 2 %	denaturointiaine
	Kvaternäärinen ammoniumkloridi	< 0,5 %	biosidi, puhdistusteho
	Alkyyliamiinia	< 0,5 %	biosidi
Muu koostumus	Pyyhemateriaali 60 % polyester, 40 % viskoosi.		
	8285: pyyhekoko 200x135 mm (16 pyyhettä).		
	8286: pyyhekoko 285 x 200 mm (30 pyyhettä).		
Tuotteen pH	10.0 heikosti emäksinen		
Varastointi	+ 5 - +25 °C		
	8285: 1,5 v. valmistuksesta		
	8286: 2 v. valmistuksesta		
Valmistusmaa	SUOMI		
Käyttö- ja ympäristöturvallisuus	<p>Easydes pintadesinfektiopyyhkeisiin liittyvistä mahdollisista vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle asiakaspalvelu@kiilto.com ja lääkinnällisistä laitteista vastaavalle viranomaiselle (Suomessa Fimea).</p> <p>Käytä biosidituotteita turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä. Tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen.</p> <p>Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.</p> <p>Hengitettynä: Tämä tuote ei sisällä hengitettynä vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Jos myrkytysoireita kuitenkin ilmenee, tuotteelle altistunut on suositeltua viedä pois altistusalueelta raittiiseen ilmaan ja pitää levossa. Lääkärin hoitoon tulee hakeutua, jos oireet jatkuvat.</p> <p>Ihon kautta: Tämä tuote ei sisällä iholle joutuessaan vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Jos tuote pääsee kosketuksiin ihon kanssa, on kuitenkin suositeltavaa riisua saastuneet vaatteet ja kengät, huuhdella iho ja jos mahdollista, suihkuttaa altistunut alue runsaalla vedellä ja neutraalilla saippualla. Jos altistuminen on merkittävä, hakeuduttava lääkäriin hoitoon.</p> <p>Silmäkosketuksen kautta: Huuhtelee silmiä vähintään 15 minuutin ajan runsaalla huoneenlämpöisellä vedellä. Silmien sulkemista ja hieromista tulee välttää. Lisävahinkojen välttämiseksi mahdolliset piilolinssit tulee poistaa silmistä jolleivät ne ole tarttuneet kiinni silmiin. Kaikissa tapauksissa on huuhtelemisen jälkeen hakeuduttava lääkäriin hoitoon niin pian kuin mahdollista ja otettava mukaan tuotteen käyttöturvallisuustiedote.</p> <p>Nieltyinä/aspiroituna: Ei saa oksennuttaa. Jos potilas oksentaa, pää on pidettävä pystyssä aspiraatiovaaran välttämiseksi. Potilas on pidettävä levossa. Huuhtelee suu ja nielu, koska on olemassa mahdollisuus, että ne ovat vahingoittuneet nielemisen yhteydessä.</p>		

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi**

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN
16 x 16 kpl	8285	6417964082852	6417964480818
18 x 30 kpl	8286	6417964082869	6417964485967

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.