



Kiilto Pro Thermoshield Desinfektant

Kemiallis-terminen desinfiointi
invasiivisille lääkinnällisille laitteille



CE
0123



Kemiallis-terminen desinfiointiaine taipuisien tähystimien koneelliseen desinfiointiin glutaarialdehydiä käyttävissä pesudesinfektioilaitteissa.

Käyttökohteet

Soveltuu käytettäväksi endoskooppien pesudesinfektioilaitteissa, jotka käyttävät glutaarialdehydiä desinfiointina tehoaineena (mm. Belimed, BHT, Olympus, Hamo).

Ammattikäyttöön.

Tuot ominaisuudet

Tähystimien turvallinen desinfiointitaso saavutetaan, kun tuotetta käytetään automaattisissa endoskooppien pesu- ja desinfiointikoneissa puhdistetulle välineistölle, annostelu 1 %, desinfiointilämpötila 55°C, vähintään 7,5 min kontaktiajalla.

Laajakirjainen mikrobisidinen teho 50 - 55 °C lämpötilassa on tutkittu: bakteerit, mykobakteerit, fungit, virukset.

Mikrobisidisen tehon tutkimustieto:

Prof. Dr. R. Schubert, Hygienist, Frankfurt a.M.: Expert report incl. quantitative suspension test regarding the antimicrobial properties for the chemo-thermal disinfection for instruments in an automated washing machine for endoscopes incl. Enterococcus faecium.

Dr. J. Steinmann, MikroLab GmbH, Bremen: Expert report on Polio virucidal activity., Expert report on Adeno virucidal activity, Expert report on Vaccinia virucidal activity, Expert report on Papova-/Polyoma virucidal activity.

Käyttö- ja annostusohje

Thermoshield Desinfektant -kanisteri liitetään koneen automaattiannostelijaan. Tähystin yhdistetään puhdistus- ja desinfiointikoneeseen laitekohtaisesti annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ennen tuotteen käyttöönottoa on varmistettava, että valmiste soveltuu käytössä olevan endoskooppien pesu- ja desinfiointikoneen desinfiointiaineeksi. Desinfiointiaineen annosteluvaiheessa käyttöveden lämpötila > 30 °C. Annostus 1 %, vaikutusaika vähintään 5 min, desinfiointilämpötilan ollessa 50-55 °C.

Koostumus

Tehoaine

Vaikutus

Glutaarialdehydi

10 %

biosidinen tehoaine

Tuotteen pH

3.5 hapan

Käyttöliuoksen pH

6.4 neutraali

Varastointi	Huoneenlämmössä		
Valmistusmaa	SAKSA		
Käyttö- ja ympäristöturvallisuus	Thermoshield Desinfektant desinfektioaineeseen liittyvistä mahdollisista vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle asiakaspalvelu@kiilto.com ja lääkinnällisistä laitteista vastaavalle viranomaiselle (Suomessa Fimea).		
Pakkauskoko / Tuotekoodi	Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
	3 x 5 l	8142	4260241965254
Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com .		