




Kiilto Pro Erisan Des

Pintadesinfektioaine

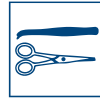

Kvatti-amiini-fenoksietanolipohjainen erikoisdesinfektioaine pesevään desinfectioon ultraäänilaitteissa, instrumentti- ja välinedesinfektioon sekä eritetahradesinfektioon.

Käyttökohteet

Terveysthuollon pintojen puhdistus ja desinfectio, pesevänä desinfectioaineena UÄ-pesulaitteissa, veri- ja eritetahradesinfectio. Ei-invasiivisten välineiden ja instrumenttien desinfectioiva puhdistus, invasiivisten instrumenttien esidesinfectio ennen pesua ja sterilointia. Suun terveysthuollon hoitoyksiköiden pintadesinfectio sekä välineiden ja instrumenttien huolto (mm. ultraäänipesulaitteissa) hygieniavaatimusten mukaisesti.

Tuotekehitetty erityisesti lääkinällisten laitteiden ominaisuudet huomioiden, soveltuu hyvin herkille materiaaleille: alumiini, kumi, erilaiset muovit.

Läkinällinen laite. Ammattikäyttöön.

Tuoteominaisuudet

Desinfectioaineina ovat didekyylidimetyyliammoniumkloridi (kvaternäärinen ammoniumyhdiste), N,N-bis (3-aminopropyli) dodekyyliamiini (alkyyliamiini) sekä 2- fenoksietanoli, joiden yhteisvaikutuksena saavutetaan laajakirjoinen teho bakteereja, hiivoja ja viruksia vastaan.

Erisan Des tuotteen teho on osoitettu seuraavin testein (testattu pitoisuus suluissa):

- EN 13727 (bakteerit) 5 min (1%)
- EN 13624 (hiivat) 5 min (1%)
- EN 14476 (vaipalliset virukset) 2 min (1%)
- EN 14476 (norovirus) 60 min (5%)
- EN 14561 (bakteerit) 30 min (1%)
- EN 14562 (hiivat) 30 min (1%)
- EN 16615 (bakteerit ja hiivat) 1 min (2%)

Testattu myös:

- EN 13697 (bakteerit) 5 min (0,5%)
- EN 13697 (fungisidinen teho) 15 min (0,5% hiivat, 1% homeet)

Käyttö- ja annostusohje

Valmista käyttölaimennos puhtaaseen, viileään veteen. Välineliotuksessa käytetään kannellista astiaa. Käytetty liuos vaihdetaan tarvittaessa, vähintään kerran viikossa. Vaihda liuos aina, kun se on näkyvästi likaantunut.

Puhdas käyttölaimennos säilyy 4 viikkoa suljetussa astiassa ja käytettäessä One System Basic pyyhepakkausta.

Erisan Des käyttö- ja laimennusohjet	%	Erisan Des	Vesi	Vaikutus-aika	Huom!
Pintadesinfektio / pyyhintä	2	10 ml	490 ml	1 min	Huuhdellaan tarvittaessa
Eritetahradesinfektio	2	10 ml	490 ml	1 min	2-vaiheinen
Välinedesinfektio, upotus	2	20 ml	980 ml	30 min	Huuhdellaan
- norovirus	5	50 ml	950 ml	60 min	Huuhdellaan
- hammashuollon poranterät	100	upotus	-	30 min	Huuhdellaan
Ultraäänipesulaite	5	50 ml	950 ml	30 min	+ liotus yhteensä 30 min, huuhdellaan
	2	20 ml	980 ml		

Huomioitavaa

Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

Desinfektioaineille herkimmat materiaalit on suositeltavaa pyyhkiä käyttöiheyden mukaan viikottain tai työpäivän päätteeksi myös vedellä tai miedolla pesuaineella kostutetulla pyyhkeellä. Käyttölaimennoksen valmistamista helpottaa 500 ml pullossa oleva mitta (kertapainallus 5 ml).

Noudata laitevalmistajien erikoisohjeistuksia.

Clostridium difficile-epidemioissa suosittelemme käytettäväksi Klorilli- tai Erisan Oxy+ desinfektioainetta.

Koostumus

Tehoaine		Vaikutus
Didekyylidimetyyliammoniu mkloridi	5-15%	biosidi
2-fenoksietanoli	5-15 %	biosidi
Isopropanolia	<5%	liuotin
Ionittomia tensidejä	< 5%	pesuteho
Trietanoliamiinia	< 5%	pH:n säätelijä
N-(3-Aminopropyli)-N-dodekyylipropaani-1,3-diamiini	<5%	biosidi, pesuteho
Dietanoliamiinia	<1%	korroosiosuoja

Tuotteen pH	11.0 emäksinen												
Käyttöliuoksen pH	10.0 heikosti emäksinen												
Varastointi	Huoneenlämmössä 3 v.												
Ulkonäkö ja tuoksu	Kellertävä neste, ominainen tuoksu												
Valmistusmaa	SUOMI												
Käyttö- ja ympäristöturvallisuus	<p>Erisan Des desinfektioaineeseen liittyvistä mahdollisista vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle asiakaspalvelu@kiilto.com ja lääkinnällisistä laitteista vastaavalle viranomaiselle (Suomessa Fimea).</p> <p>Käytä biosidituotteita turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä. Tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen.</p>												
Pakkauskoko / Tuotekoodi	<table><thead><tr><th>Myyntierä</th><th>Tuotekoodi</th><th>GTIN</th><th>Myyntierän GTIN</th></tr></thead><tbody><tr><td>3 x 3 l</td><td>8127</td><td>6417964081275</td><td>6417964482416</td></tr><tr><td>12 x 500 ml</td><td>8126</td><td>6417964081268</td><td>6417964482423</td></tr></tbody></table>	Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN	3 x 3 l	8127	6417964081275	6417964482416	12 x 500 ml	8126	6417964081268	6417964482423
Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN										
3 x 3 l	8127	6417964081275	6417964482416										
12 x 500 ml	8126	6417964081268	6417964482423										
Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com .												